



Strampler ohne Kragen (B)



Strampler mit Kragen (B)



Strampler ohne Kragen
mit Fäustlingen und
geschlossenen Fußspitzen (B)



Strampler mit Kragen
mit Fäustlingen und
geschlossenen Fußspitzen (B)



Wickelbody Kurzarm
ohne Kragen (B)



Body Kurzarm
mit Kragen (B)



Wickelbody Langarm
ohne Kragen mit Fäustlingen (B)



Body Langarm mit Kragen
mit Fäustlingen (B)



Achselshirt (E)



T-Shirt (K/E)



Langarmshirt
mit Fäustlingen (K)



Langarmshirt (K/E)



Socken (K/E)



Beinstulpen (E)



Leggin (K/E)



Strumpfhose (B)



Panty (E)



Armstulpen (E)



Fäustlinge (K)



Handschuhe (E)



Mütze mit Befestigung (B)



Mütze (K)




Stirnband (K/E)



Schal (K/E)

WIRKUNG
KLINISCH
BESTÄTIGT!

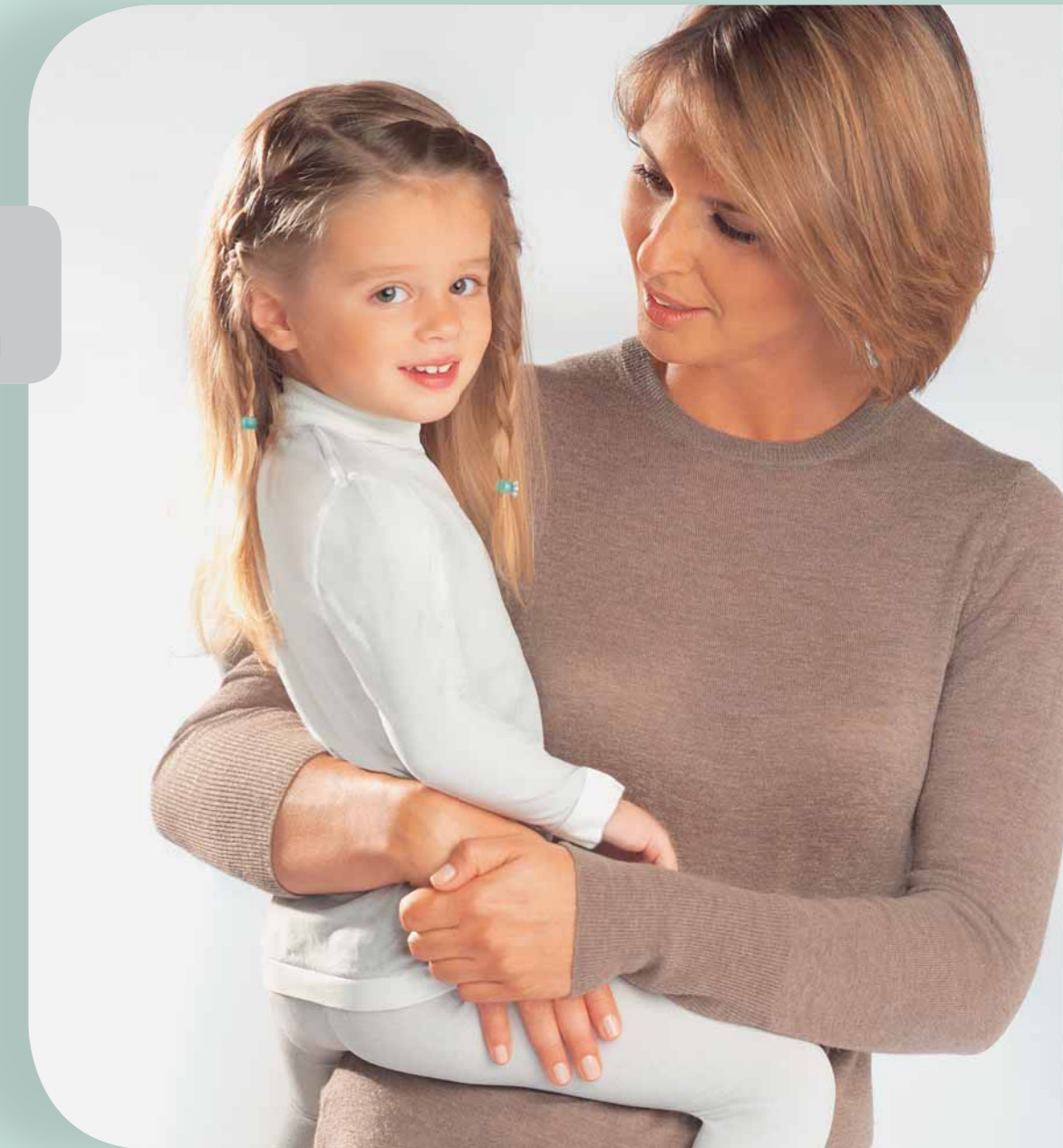

Weiche
medizinische
Textilien mit
antibakteriellem
Silberfaden

Juzo® SkinProtect® Silver

Wirksame Hilfe bei Neurodermitis

Wirkung klinisch bestätigt: Weiche medizinische Textilien mit antibakteriellem Silberfaden



Juzo® SkinProtect® Silver

Wirksame Hilfe bei Neurodermitis

Wirkung klinisch bestätigt: Weiche medizinische Textilien mit antibakteriellem Silberfaden

Neurodermitis (atopische Dermatitis) ist eine chronische, schubweise verlaufende Erkrankung der Haut, die häufig von starkem Juckreiz begleitet ist. In Deutschland sind davon ca. 15% der Kinder und 1-2 % der Erwachsenen betroffen, insgesamt über 10 Millionen Menschen!

Die Haut des Neurodermitikers reagiert auf unterschiedlichste Reize mit Entzündungserscheinungen, Ekzemen und Juckreiz. Das allgemeine Wohlbefinden sowie die Nachtruhe des Patienten werden dadurch erheblich beeinträchtigt. Besonders bei Kindern können die gesamte Entwicklung und das seelische Gleichgewicht entscheidend gestört werden. Nur konsequente Auslöservermeidung, spezielle Pflegemaßnahmen und stadiengerechte Therapie können helfen, die schlimmsten Symptome zu lindern.

Mit unterschiedlichsten Therapieansätzen werden heute Entzündungserscheinungen und Ekzeme der Neurodermitis behandelt. Viele jedoch sind verbunden mit unerwünschten Nebenwirkungen.

Eine neue schonende Therapieform bei der Neurodermitis-Behandlung ist der Einsatz von silberhaltigen Textilien.


Der Silbergehalt der Textilien eliminiert Bakterien und Keime, die großen Einfluss auf die Neurodermitisschübe haben. Durch das Tragen von silberhaltigen Textilien kann sich die Haut des Neurodermitikers beruhigen, der Juckreiz nimmt automatisch ab, Schwellungen und Rötungen gehen zurück, ebenso die nässenden Hautstellen.

Der Kreislauf Jucken – Kratzen – Hautreizung wird mit Hilfe dieser antibakteriellen Silbertextilien unterbrochen.

Aufgrund der überaus positiven Erfahrung mit der antibakteriellen Silberausstattung seiner Kompressionsgestricke (z.B. Juzo® Expert Silver) hat Juzo® nun die neuartigen silberhaltigen Textilien Juzo® SkinProtect® Silver für Neurodermitiker entwickelt. Diese weichen Textilien mit den kaum spürbaren flachen Nähten entfalten durch den eingestrickten Silberfaden eine besondere antibakterielle Wirkung auf die Haut.

Die Wirksamkeit der medizinischen Textilien Juzo® SkinProtect® Silver wurde durch eine wissenschaftliche Studie an der Universitäts-Hautklinik Greifswald klinisch bestätigt.

Die Wirkweise von Juzo® SkinProtect® Silver

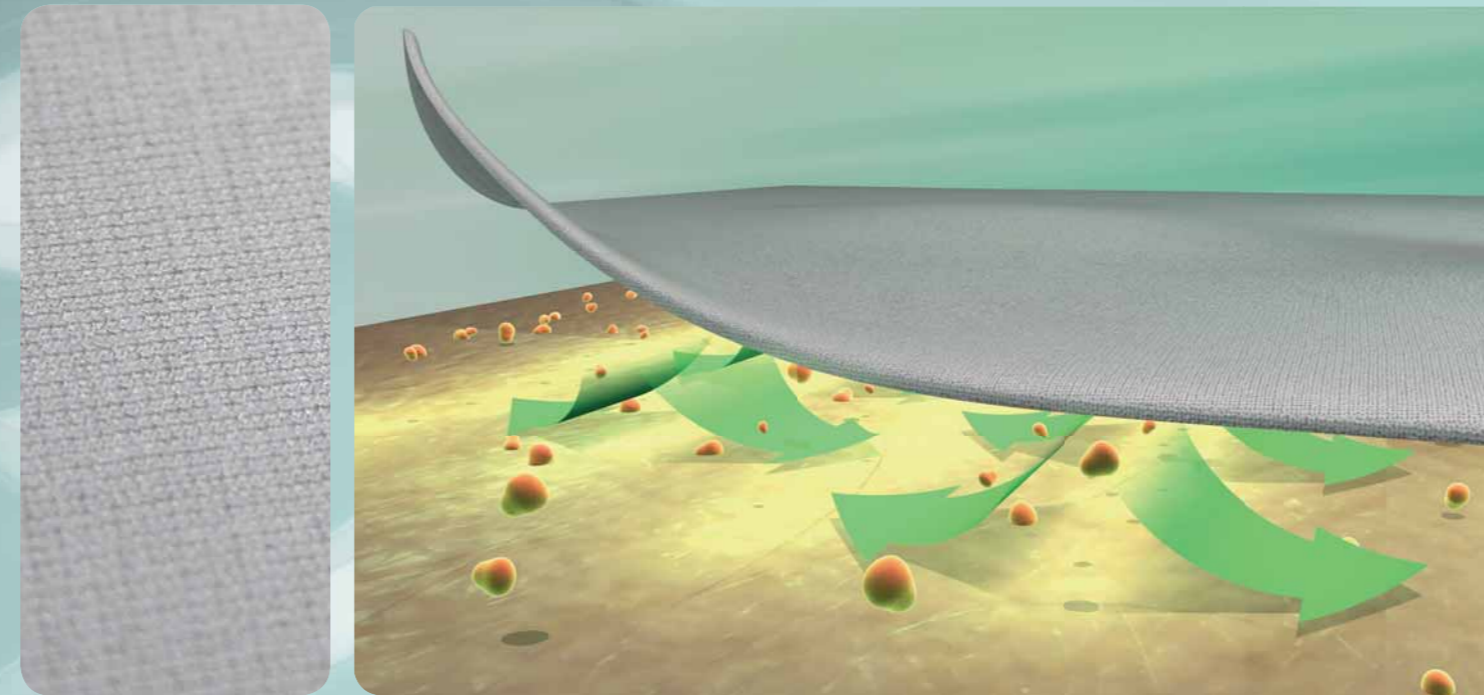

Durch das spezielle Juzo® Herstellungsverfahren liegt bei SkinProtect® Silver der Silberfaden X-Static auf der Innenseite der Textilien, somit wird eine hundertprozentige Hautabdeckung erreicht. Die silberhaltigen Textilien unterdrücken durch ihre antibakterielle Wirkung die Kolonisierung der Haut mit dem Eiterbakterium Staphylococcus aureus sowie die Toxinbildung. Die entzündliche Reaktion der Haut wird dadurch effektiv abgeschwächt. Der auf die Hautflora exakt abgestimmte Silberanteil stellt das Gleichgewicht entzündlicher und irritierter Haut schnell

wieder her, schützt vor weiteren Infektionen und beugt somit dem Juckreiz vor.

Die Bedeckung der Haut mit Juzo® SkinProtect® Silver hat zudem den günstigen Effekt, den Einfluss externer Auslöserfaktoren zu reduzieren.

Die starke Dochtwirkung des Silbers bewirkt außerdem eine schnelle Verdunstung der Hautfeuchtigkeit, die Haut des Patienten bleibt somit angenehm trocken und kühl.


Wissenschaftliche Studie zu Juzo® SkinProtect® Silver an der Universitäts-Hautklinik Greifswald:

Wirksamkeit und Verträglichkeit eines silberhaltigen Textils bei der Behandlung der atopischen Dermatitis (AD).

Ziele:

Beurteilung der klinischen Wirksamkeit und Verträglichkeit des silberhaltigen Textils Juzo® SkinProtect® Silver bei der Behandlung von Patienten mit Neurodermitis.

Methode:

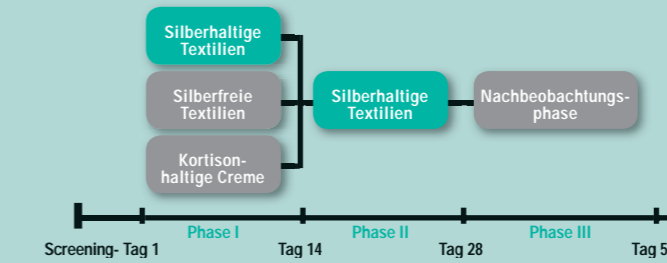

30 Patienten mit Neurodermitis im akuten Schub wurden in einer Vergleichsstudie in drei parallele Gruppen aufgeteilt.

In den ersten 14 Tagen erhielten die Patienten der drei Studienarme unterschiedliche Behandlungen (silberhaltiges Textil, Placebo-Textil (silberfreies Textil), Kortison-haltige Creme).

Von Tag 15 bis Tag 28 erhielten alle Studienteilnehmer silberhaltige Textilien Juzo® SkinProtect® Silver.

Von Tag 29 bis Tag 56 wurden die silberhaltigen Textilien nicht mehr getragen.

Ergebnisse:


Das silberhaltige Textil reduzierte signifikant den Schweregrad des Juckreizes. Die silberfreien Placebo-Textilien und Kortison-haltige Creme waren weit weniger effektiv.

Die silberhaltigen Textilien, die direkt auf der Haut getragen wurden, führten zu einer **signifikanten Verbesserung der Neurodermitis** und zu einer **Reduktion des Verbrauchs an Kortison-haltiger Creme.**

Es wurden keine toxischen Nebenwirkungen der verwendeten Silbertextilien im Körper bzw. Stoffwechsel beobachtet.

Die Trageeigenschaften wurden als sehr positiv bewertet.

Quelle: Jünger M et al. Efficacy and safety of silver textile in the treatment of atopic dermatitis (AD). CMRO 2006; 22:748

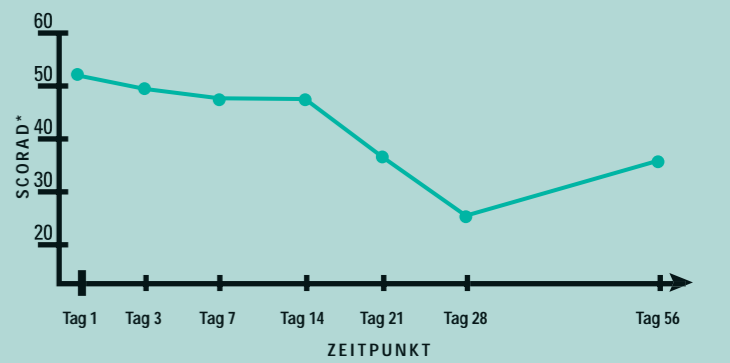

*SCORAD bezeichnet den Schweregrad einer Dermatitis.

EIGENSCHAFTEN DES EINGESTRICKTEN X-STATIC SILBERFADENS

Antibakteriell:

Durch den eingestrickten X-Static Silberfaden eliminieren positiv geladene Silberionen die Bakterienzellen und erzielen somit eine antibakterielle Wirkung.

Natürlich:

Silber wirkt auf natürliche Weise antibakteriell.

Thermodynamisch:

Silber verfügt über thermodynamische Eigenschaften: Im Sommer hat es eine kühlende, im Winter eine wärmende Wirkung. Juzo® SkinProtect® Silver reguliert den Wärmehaushalt zwischen dem Gestrick und der Haut und bietet dadurch einen erhöhten Tragekomfort.



Geruchshemmend:

Körpergeruch erzeugende Stoffe wie Ammoniak und denaturierte Proteine binden rasch an Silber. Dadurch wird unangenehmer Geruch verringert.

Dauerhaft:

Der Silberfaden X-Static ist mit reinem Silber ohne chemische Zusätze hergestellt und bleibt dauerhaft im Textil. Waschtests haben ergeben, dass der Anteil an Silberfaden auch nach 250 Waschzyklen nicht abnimmt.

